

## COPA DE LUNA



La copa menstrual es una innovadora protección para usar durante la **menstruación**. Se trata de una **alternativa higiénica** al uso de tampones y compresas desechables que es fácil de usar y segura. Además **protege el medio ambiente**, es **económica** y nos despreocupa.

Fabricada de 100% silicona médica:

- Hipoalergénica y sin látex
  - Suave y flexible
  - Rentable y ecológica, puede durar de 5-10 años
- Respeto la lubricación natural de la vagina ni reseca las membranas mucosas
  - Puede usarse para realizar cualquier actividad física

La copa se inserta en la vagina donde los músculos vaginales la sujetan. Por lo general sólo precisa vaciarla 2-4 veces al día. Tras vaciarla, enjuague su copa con cuidado en abundante agua y jabón. También puede esterilizarse en agua hirviendo de 2-5 minutos.

### Copa menstrual modelo 1:

Recomendado para mujeres que no han tenido relaciones sexuales o menores de 20 años. Dimensiones: diámetro 41 mm. largo 47 mm, apéndice 25 mm. Capacidad 25 ml.

### Copa menstrual modelo 2:

Recomendado para mujeres con flujo abundante y mayores de 20 años.

Dimensiones: diámetro 46 mm. largo 52mm, apéndice 25 mm. Capacidad 30 ml.

